

## EMPFEHLUNG HANDHABUNG

- Damit die Innenseite nicht kontaminiert wird, die Hände gründlich mit Seife vorher waschen.
- Optional kann ein Zellstoff oder Vlies in der Innenseite der Maske eingelegt werden und unter den Eckfalten festgehalten werden.
- Die Maske an den Tragegummies greifen, über Mund und Nase platzieren und die Tragegummies hinter die Ohren klemmen.
- Das Berühren der Maske sollte während des Tragens vermieden werden.
- Nach ca. 1,5 - 2 Stunden sollte die Maske gewechselt werden.
- Die Maske an den Tragegummies hinter den Ohren greifen und in einen verschließbaren Beutel legen. Dabei versuchen die Vorderseite nicht zu berühren.
- Erneutes Händewaschen (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).
- Anschließend den Mundschutz wie weiter unten empfohlen Waschen.

## EMPFEHLUNG PFLEGE

- Vor dem ersten Tragen die Masken waschen.
- Damit die Tragegummis nicht beschädigt werden, im Wäschenetz/Wäschesack waschen.
- Die Masken im Topf oder in der Waschmaschine bei 60°C mit Waschmittel waschen.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Masken unterliegen keiner Testung, Zertifizierung bzw. Zulassung und dienen nicht zur persönlichen Schutzausrüstung.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass WAS Schafer keine Haftung für die Wirksamkeit und sachgerechte Verwendung der Behelf-Mund-Nasen-Maske übernimmt. Jeglicher Schadenersatzanspruch gegenüber der Firma WAS Schafer wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – unabhängig, ob vom Verwender oder dem jeweiligen Gegenüber – ist ausgeschlossen.

Die Verwendung der Behelf-Mund-Nasen-Maske erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts zu beachten sind.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schaefer  
WAS Schaefer Werkzeugmaschinen- und Anlagenservice